


Come usare:


Ricevitore audio EarTech TV archetto da collo

ATTENZIONE: se si dispone di un pacemaker, contattare il proprio medico o il produttore del Pacemaker prima di utilizzare il collare per assicurarsi che il pacemaker non lo sia Soggetto a disturbi.

1. Accendi la tua sorgente sonora (ad esempio la televisione) e imposta i tuoi apparecchi acustici sull'impostazione T-coil.
2. Innanzitutto, imposta il volume della tracolla su un volume basso per il tuo Ascolta.
3. La fibbia della tracolla viene utilizzata per trasportare in modo sicuro il dispositivo ed è progettata in modo che possa Riduci al minimo gli incidenti. Assicurati che la fibbia della tracolla sia completamente chiusa (vedi pag. 6)
4. Accendere il ricevitore della tracolla utilizzando l'interruttore ON/OFF sul lato del ricevitore. Il LED verde lampeggiante sul ricevitore indica che il ricevitore è acceso. quello Il LED si illumina in verde non appena viene ricevuto un segnale dalla sorgente sonora. Quando il verde Il LED continuerà a lampeggiare dopo un minuto, vedere pagina 11 per le istruzioni di associazione.
5. Impostare il volume desiderato sul ricevitore della tracolla.
6. Si consiglia di spegnere il collare e reinserirlo nel trasmettitore. Stazione di ricarica quando non in uso per garantire che la batteria sia sempre carica.

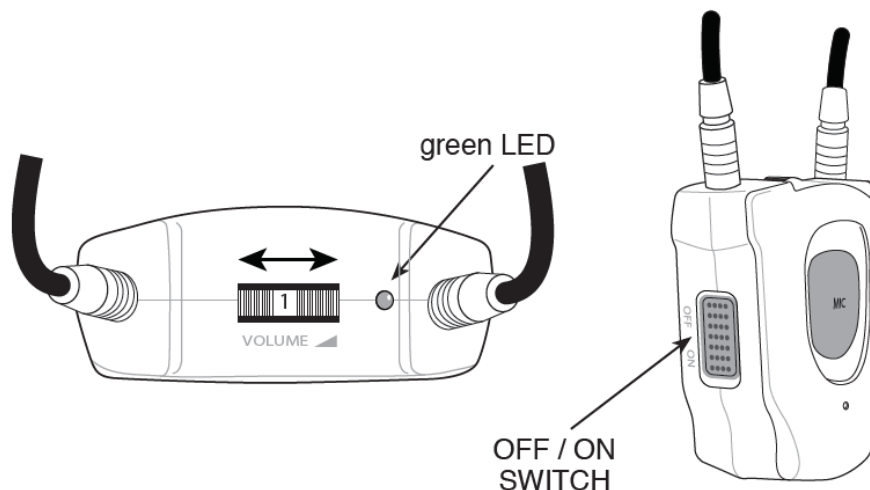


Chiusura di sicurezza nella tracolla

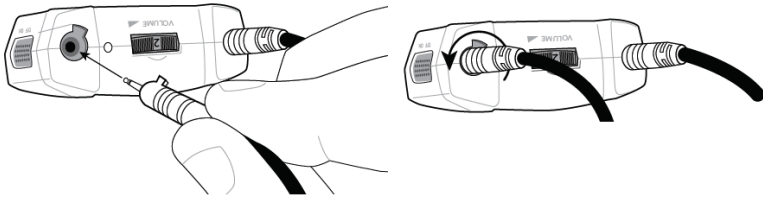

Assicurarsi che il blocco di sicurezza nella tracolla sia completamente chiuso per garantire una sicurezza Funzione.


Ascoltare con apparecchi acustici con bobina a Ascolto con uscita stereo da 3,5 mm (collo)

Hören mit 3,5-mm-Stereo-

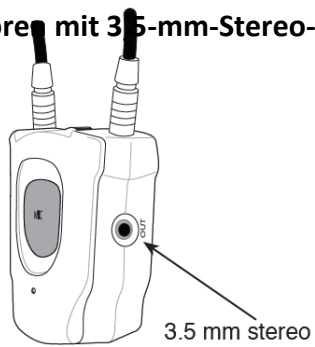

Cuffie o auricolari

(Neckloop)

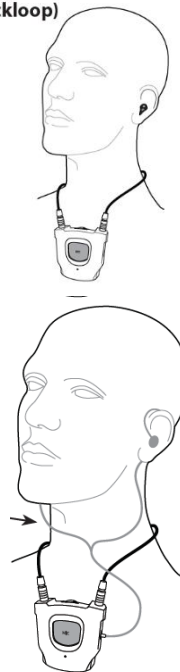

Importante!

Il tempo di funzionamento totale del ricevitore può essere notevolmente ridotto a seconda del volume di ascolto e degli accessori collegati all'uscita.