



Sonic Alert
America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom Traveler con PAD Vibrazione Display con 5 Livelli luminosità e ricarica USB

Modello SBT600ss



ISTRUZIONI PER L' USO


IMPORTANTE – Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell' uso, e di conservarle per eventuali consultazioni future.

– Utilizzare solo l'adattatore in dotazione per collegare l'unità.

Attenzione: Per prevenire incendi o scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Prima di collegare alla rete elettrica, accertarsi che i requisiti specificati sull' apparecchio corrispondano alla rete di alimentazione disponibile: es. AC100-220V~, 50/60 Hz.

- La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come, giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessuna sortente di calore, come candele, deve essere posizionata sull' apparecchio.
- L' apparecchio non deve essere esposto ad acqua, gocce o spruzzi o oggetti pieni di liquido, come vasi, bicchieri, contenitori ed altro.
- Non posizionare l' apparecchio in luoghi chiusi o non ventilati (come armadi).

ISTRUZIONI PER L'USO

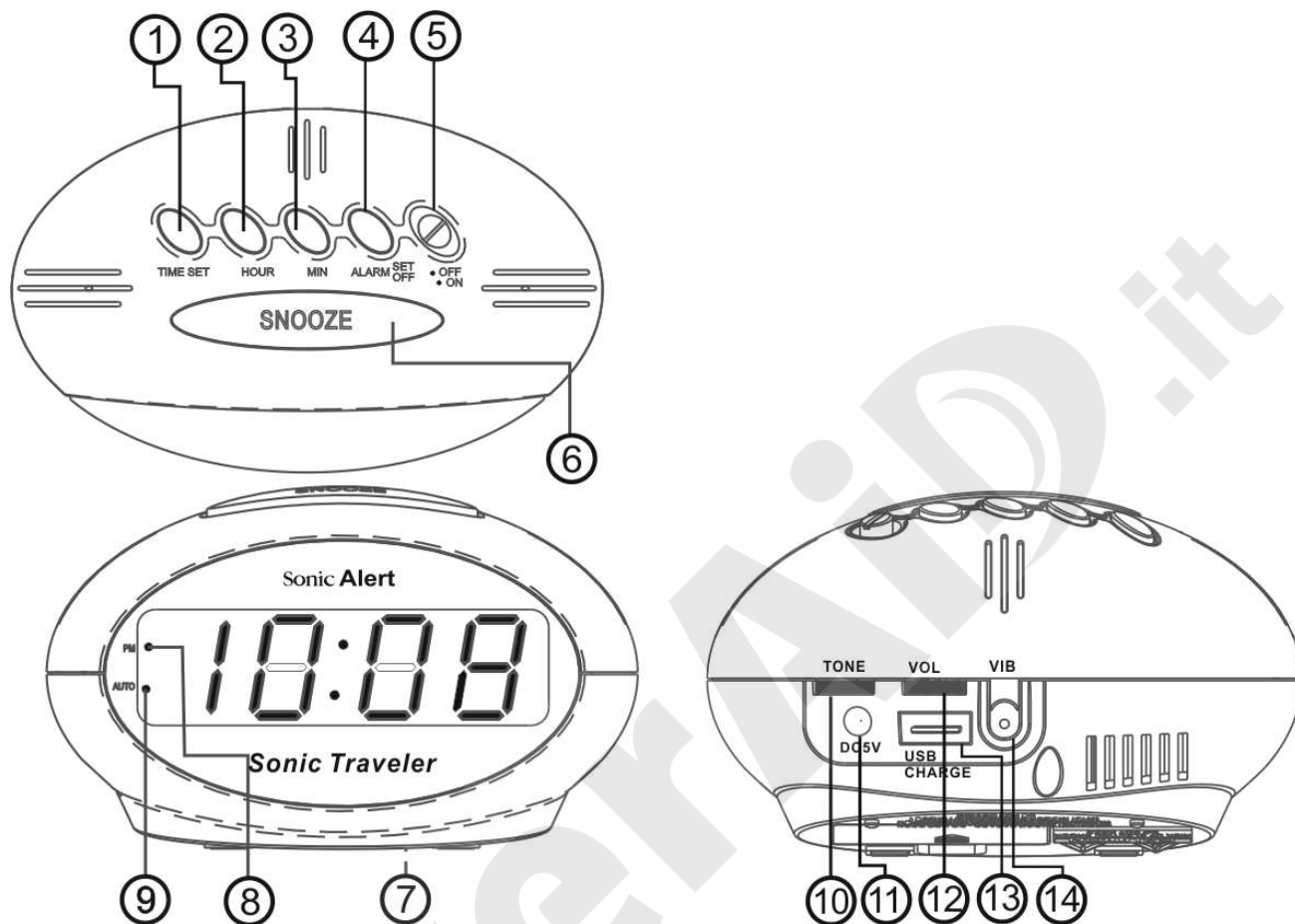

Features show on diagram above:

1. Time Set / Settaggio Ora	8. PM indicator
2. Hour / Ora	9. Auto (Alarm ON indicator)
3. Min / Minuti	10. Tone / Regolazione Toni
4. Alarm Set / Off / Settaggio Allarme / Off	11. DC5V input / Presa per Alimentatore
5. Alarm On-Off / Allarme On-Off	12. Volume / Regolazione Volume
6. Snooze / Dimmer	13. USB Charging / Carica USB
7. Battery Cover / Vano Batteria	14. Vibrator Input / Presa per PAD Vibrazione

Modalità Test:

- 1) Tenere premuti i pulsanti Snooze e Time per 3 secondi per entrare nella modalità TEST.
Il display visualizzerà "7ES7" per indicare che è in modalità TEST.
- 2) Se entro 1 minuto non si preme alcun tasto, allora uscirà automaticamente dalla modalità TEST per ritornare alla modalità standard (visualizzazione ora corrente).
- 3) Premere un tasto qualsiasi entro 1 minuto (tranne i pulsanti Snooze & Time, che non avranno alcun effetto) per uscire immediatamente dalla modalità TEST.
- 4) Quando è nella modalità TEST, l'unità mostrerà le sue funzioni, tra cui Buzzer, Flashing e Vibrazione (se il PAD a vibrazione è collegato correttamente).
- 5) Una volta terminata la modalità TEST premere qualsiasi pulsante (tranne i pulsanti Snooze & Time, che non avranno alcun effetto) per uscire immediatamente dalla modalità TEST.

Settaggio dell' ora corretta –

- 1) Tenere premuto il pulsante **Time Set (1)** e nello stesso tempo premere il pulsante **Hour (2)** per avanzare il display dell' orologio fino al raggiungimento dell' ora corretta.
- 2) Tenere premuto il pulsante **Time Set (1)** e nello stesso tempo premere il pulsante **Minute (3)** per avanzare il display dell' orologio fino al raggiungimento dei minuti corretti.
Una spia PM indicator (8) nella parte bassa sinistra indicherà se l' ora è PM (pomeridiana)
Per indicare l' ora non pomeridiana, la spia sarà spenta.

Impostare ora della sveglia –

- 1) Tenere premuto il pulsante **Alarm Set (4)** e nello stesso tempo premere il pulsante **Hour (2)** per avanzare il display dell' orologio fino al raggiungimento dell' ora richiesta.
- 2) Tenere premuto il pulsante **Alarm Set (4)** e nello stesso tempo premere il pulsante **Minute (3)** per avanzare il display dell' orologio fino al raggiungimento dei minuti richiesti.
- 3) Accertarsi che l' allarme sia correttamente settato su AM o PM, la **spia luminosa (8)** indica PM. Si prega di rilasciare i pulsanti HOUR (2) e MIN (3) prima di rilasciare il pulsante ALARM (4).

Impostare il formato 12 o 24 ore –

- 1) Tenere premuto il pulsante **Hour (2)** per 6 secondi per accedere alla modalità selezione ora; rilasciare il pulsante **Hour (2)** quando il display indica "12 H" o "24 H".
- 2) Premere e rilasciare il pulsante per passare da ore 12 o 24. Se nessuna selezione viene effettuata entro 4 secondi, l' ultimo formato dell' ora visualizzata verrà memorizzata, e il display tornerà al normale Time mode.

Svegliarsi con Allarme –

- 1) Se è richiesta solamente la suoneria, non collegare il PAD vibratore.
- 2) Settare il volume desiderato utilizzando la rotellina **Volume (12)**.
- 3) Se è richiesta solamente la vibrazione, collegare il PAD vibratore nella presa **Vibrator (14)** e disattivare il volume della suoneria utilizzando la rotellina the **Volume (12)**.
- 4) Se entrambi (suoneria e vibrazione) sono richiesti, collegare il PAD vibratore e settare il volume al livello desiderato.
- 5) Impostare l'ora di attivazione dell'allarme seguendo le istruzioni descritte sopra.

Regolare la durata della sveglia

L' impostazione predefinita del tempo di durata dell' allarme è 30 minuti. E' possibile regolare la durata dell' allarme in un intervallo di tempo tra 1 minuto 59 minuti. Per regolare la durata dell' allarme:

- 1) Tenere premuto il pulsante **AL. SET (4)** per 6 secondi. Sul display dell' orologio saranno mostrati i minuti attualmente impostati (di default 30'), Rilasciare il pulsante AL. SET.
- 2) Premere il pulsante **MIN (3)** per impostare la durata desiderata dell' allarme, da 1 minuto fino a 59 minuti.
- 3) Quando il display mostrerà la durata desiderata, attendere 3 secondi per ritornare alla normale modalità orologio. La nuova durata impostata, diventerà il nuovo valore di default, e tale rimarrà fino a quando non verrà cambiata di nuovo.

Disattivare l' allarme –

L' allarme può essere spento per il giorno medesimo, o disattivato permanentemente.

- 1) Quando suona la sveglia, è sufficiente premere il pulsante **AL Off (4)**, l' allarme si disattiverà per quel giorno, e tornerà attivo per il giorno dopo alla stessa ora preimpostata.
- 2) Per disattivare l' allarme permanentemente, spostare la leva **ON/OFF (5)** sulla posizione Off.
L' allarme non si attiverà più fino a che la leva **ON/OFF (5)** non sia di nuovo posizionata su On.

Funzione Snooze–

Pulsante SNOOZE (6) – premere dopo che l' allarme ha cominciato a suonare. L' allarme sarà spento per 9 minuti, per un sonno Extra. Dopo 9 minuti l' allarme tornerà a suonare. Puoi utilizzare la funzione Snooze fino ad un massimo di 13 volte.

Settaggio della durata della funzione Snooze

Di default la funzione Snooze ha una durata di 9 minuti, ma è possibile impostare una durata tra 1 minuto e 30 minuti, come desiderato. Per impostare la durata della funzione Snooze:

- 1) Tenere premuto il pulsante **SNOOZE (6)** per 6 secondi. Il display mostrerà il tempo di default preimpostato: 9 minuti. Rilasciare il pulsante Snooze.
- 2) Premere il pulsante “**MIN**“ (**3**) per rimpostare il tempo di durata desiderato, da 1 minute a 30 minuti.
- 3) Quando sul display apparirà la durata desiderata, attendere 3 secondi per ritornare alla modalità standard orologio. La nuova durata rimarrà in memoria e diventerà il nuovo valore di default fino a che non verrà di nuovo cambiata.

Volume –

Per regolare il volume, ruotare la rotella **Volume (2)** fino al raggiungimento del livello desiderato.

Toni –

Regolare i toni desiderati ruotando la rotella **Tone (10)** fino al raggiungimento del tono desiderato.

Funzione Dimmer

Ci sono 5 livelli di luminosità impostabili per il Display. Premere il pulsante **SNOOZE (6)** per scegliere il livello di luminosità desiderato. La luminosità ha un ciclo del tipo: 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (da forte a debole, e da debole a forte).

***NOTA*:** La funzione Dimmer non funziona quando l' orologio è in modalità Snooze.

PAD vibrazione / vibrazione letto

- 1) Collegare il PAD vibratore alla relativa presa dietro la sveglia: **VIBRATOR input (14)**.
- 2) Posizionare il PAD vibratore sotto il materasso (sopra le doghe/rete) o sotto il cuscino.

Carica USB

Questa sveglia è dotata di una comoda presa di carica USB posizionata nella parte posteriore, che vi permette di ricaricare numerose apparecchiature, tra cui telefoni, tablets, lettori MP3 e tanti altri apparati che vengono forniti con i cavi di ricarica USB. La potenza in uscita della porta USB è di 500mA. Per caricare il tuo dispositivo, collegare il cavo fornito in dotazione al dispositivo, alla presa USB **USB charging port (13)** posizionata sul retro della sveglia. Osservare l' indicatore di carica del dispositivo per accertarsi che sia realmente in carica.

Nota: il tempo di ricarica varia a seconda della corrente di carica che il dispositivi richiede. Pertanto per alcuni dispositivi il tempo di ricarica potrà essere maggiore rispetto ad altri.

Batteria di Backup –

Per utilizzare tale funzione, è necessario installare una pila Alkalina da 9V nell' opposto vano, sotto il coperchio **battery (7)**. Si prega di tenere in considerazione che durante una mancanza di corrente l' ora non sarà visualizzabile, ma la sveglia manterrà tutte le sue impostazioni di ora e allarme.

NOTE: Per ottenere i migliori risultati si consiglia di sostituire la pila ogni 6-8 mesi. Se la sveglia non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo, si consiglia di rimuovere la pila onde evitare perdite.

DC 5V Power Input –



Collegare il cavo DC Power nell' opposta presa sul retro della sveglia: **DC5V INPUT (11)** .

GENERAL DATA

UL listed Power Adaptor: AC100-240V~, 50/60Hz


Power Consumption: Adaptor Output: DC5V **DC5V INPUT (11)** , 800mA

USB Charging Port Rating: 500mA

 <p>The Lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of dangerous voltage inside the product.</p>	<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER.</p>	 <p>The exclamation mark within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.</p>
--	--	--

ATTENZIONE: ONDE PREVENIRE SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L' APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITA'

Normal function may be disturbed by strong electromagnetic interference. If this is the case, normal function can be resumed by simply unplugging and plugging of the power adaptor. If function does not resume, try moving the unit to another location.

- Si richiede l'attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
-  Questo indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SONIC ALERT - GARANZIA DI 1 ANNO

La sveglia Sonic Traveler modello SBT600ss è garantita contro difetti di produzione di materiali e lavorazione per un 1 anno dalla data di acquisto. Entro questo periodo Sonic Alert riparerà o sostituirà a propria discrezione il SBT600ss senza addebiti per componenti e manodopera. Inviare il SBT600ss e una copia del vostro scontrino come prova di acquisto a:

PowerAiD Srl – Sez. RESI - Via del Chionso, 14 – 42122 Reggio Emilia

Sonic Alert

Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-888-864-2446

Made in China

Distribution Italy: PowerAiD Srl - Via del Chionso, 14 - 42122 Reggio Emilia

www.poweraid.it italia@poweraid.it